

사용 방법

- 1) 멸균기의 전원을 켜세요.
 ※ 10초 정도 소요되며, 전원이 켜져있어야 도어가 열립니다.
- 2) 도어 손잡이를 당겨서 문을 열고, 챔버에 멸균물을 적재합니다.
 ※ 도어를 무리하게 잡아당기지 마세요.
 ※ 멸균물 적재 시, 사각 마운트와 트레이를 꼭 사용하세요.
 (미사용시 안쪽 센서에 기구가 닿지 않도록 주의하세요.)
 ※ 센서에 기구가 닿거나 멸균물 과적재 시, E32045 에러가 뜹니다.
 (멸균물의 양을 줄이고, 재가동 하세요.)
- 3) 도어를 닫고, 도어 핸들을 접어 잠금 후 디스플레이를 터치하여 프로그램을 선택합니다.



프로그램	멸균 시간	건조 시간	용도
Universal B (범용 B)	134°C / 5.5분	20분	포장 기구 (Full) / 일반 멸균 (40~50분 소요)
Quick B (속성 B)	134°C / 5.5분	10분	포장 기구 (Half) / 소량 멸균 (35~45분 소요)
Gentle B (섬세 B)	121°C / 20.5분	20분	포장 기구 (Full) / 낮은 온도에서 긴시간 멸균
Prion B (프리온 B)	134°C / 20.5분	20분	포장 기구 (Full) / 강한 멸균이 필요할 때
Quick S (속성 S)	134°C / 3.5분	5분	비포장 기구만 멸균 / 멸균 후, 바로 사용 할 목적의 급한 기구



- 4) 프로그램 선택 후, 디스플레이의 시작 버튼(START PROGRAM)을 누르세요.
 ※ 멸균 온도가 121°C에 도달하면 자동으로 동작을 시작합니다.
 ※ 모든 단계에서 중지 버튼을 눌러 취소할 수 있으며, 화면에는 현재 프로그램과 남은 시간, 종료 예상 시간이 표시됩니다.
 ※ 설정 버튼을 눌러 해당 사이클의 건조 시간을 조절할 수 있습니다.
 ※ 멸균 동작이 정상적으로 끝나면, 멸균 성공 메시지(녹색)가 표시됩니다.
 ※ 멸균 동작 중, 에러가 발생하면 멸균 실패 메시지(빨간색)가 표시됩니다.

디스플레이에서 프로그램 선택



멸균 성공 시, 디스플레이 아래 녹색 LED 점등/신호음 한번

멸균 실패 시, 디스플레이 아래 빨간색 LED 점등/신호음 세번

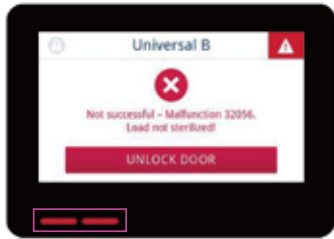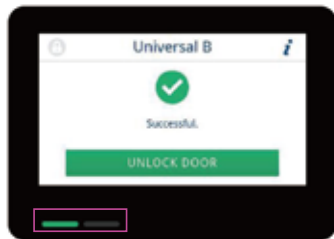

관리 방법

- 1) **급배수통 관리** : 매월 1회 상부 덮개를 열고, 저수통(B)과 회수통(C)을 청소 후, 아래쪽 배수 밸브에 배수 호스를 연결하여 물을 완전히 빼세요.
 ※ 배수 호스를 배수 밸브에 연결, 시계반대 방향으로 90도 돌려서 물을 뺀 후, 다시 시계방향으로 90도 돌려 밸브를 잠그세요.
- 2) **챔버 관리** : 멸균기 사용 후, 매일 보풀 없는 천을 물에 적셔 닦아주세요.
 ※ 도어를 열고, 도어 가스켓과 도어록 부위 손상이 없는지 확인하고 깨끗이 닦아주세요. 절대 약재를 사용하여 닦지마세요.
- 3) **탱크 필터(A) 관리** : 바닥에 있는 필터를 매월 1회 빼서, 에어로 청소 후 다시 끼워주세요.
- 4) **수처리 장치 필터 교체 (옵션)**
 ※ 공급수 수질 확인 메시지가 표시되면 수처리 장치 필터를 교체하세요.
 ※ 수도관 IN 밸브를 잠그고, OUT 밸브를 약 10초간 열어서 내부의 물을 빼줍니다.
 ① 전용 렌치로 수통을 OPEN 방향으로 돌려 풀어주세요.
 ② 수통을 손으로 돌려 빼냅니다. 수통 내부의 남은 물과 사용한 필터를 버려주세요. (수통 내부의 실링이 유실되지 않도록 주의하세요.)
 ③ 새 필터를 수통에 넣고, 수통을 CLOSE 방향으로 손으로 돌려 잠그세요.
 ④ 전용 렌치로 수통을 다시한번 단단히 잠궈줍니다.
 ⑤ 동일한 방법으로 나머지 필터도 교체합니다.
 ※ 수도관 IN 밸브를 열고, 물을 공급한 후 누수가 없는지 확인합니다.

