

MELAdem 40 수처리 장치 필터 교체 방법

MELAdem 40 구성품



Filter 교체 방법

- 열려있는 IN 밸브를 잠그세요.
- 잠겨있는 OUT 밸브를 열어물을 뺍니다.
- 카트리지가 커버를 엽니다.
- 렌치를 꺼냅니다.
- 렌치로 카트리지를 시계방향으로 돌려 풀어줍니다. (Open)
- 카트리지를 손으로 잡고 시계반대로 돌려 빼냅니다. (Open)
- 카트리지가 용기에 남아있는 물을 버려주세요.
- 카트리지에서 필터를 빼고, 버려주세요.
- 새 필터를 카트리지에 넣어줍니다.
- 카트리지를 손으로 잡고 시계반대 방향으로 돌려 삽입합니다. (Close)
- 렌치로 카트리지를 시계반대 방향으로 돌려 꺾 조여줍니다. (Close)
- 열려있는 OUT 밸브를 잠그세요.
- 잠겨있는 IN 밸브를 열어주세요. 물이 공급됩니다.
- 반드시 수처리장치의 누수를 확인 후, 사용하세요.